

UniGel[®] APOTEX

– riešenie na ľahké a rýchle ošetrenie rany



UniGel[®] APOTEX ponúka jedinečné riešenie na hojenie akútnych rán, ako sú rezné rany, odreniny, popáleniny I. a II. stupňa, opary (napr. drobné poranenia v domácnosti, pri športe či hrách), ako aj chronických rán typu vredov predkolenia spôsobených poškodením žilného alebo tepnového systému, diabetické nohy, preležanín, pooperačných a ostatných poškodení kože. K výnimočným vlastnostiam **UniGel[®] APOTEX** prispieva vlhké prostredie pri liečbe rán. Stabilná vlhkosť v rane zabraňuje tvorbe chrást a tým napomáha urýchľovať proces hojenia.

PREČO POUŽÍVAŤ NA OŠETROVANIE RÁN FORMU GÉLU?

UniGel[®] APOTEX vďaka svojim vlastnostiam preukázal v klinických skúšaniach, že:

- chemicky viaže kyslíkové radikály, ktoré vznikajú pri zápalových procesoch
- vytvára optimálne pH v rane a tým napomáha hojenie
- preverená štruktúra gélu zabraňuje uvoľňovaniu častíc gélu do rany s následnou iritáciou (nezaschýna)
- dodáva vlhkosť do rany
- zabraňuje vysušovaniu rany a tvorbe chrást
- má schopnosť nasávať a tým čistí znečistené rany
- znižuje bolestivosť rán
- podporuje uzatváranie rany jazvou
- pričasnej aplikácii zabraňuje vzniku jazvy, prípadne zlepšuje jej vzhľad

ZLOŽENIE:

UniGel[®] APOTEX je hydrofilný metakrylátový gél na báze sieťovaného kopolyméru 2-hydroxyetylmetakrylátu obsahujúceho polymérne viazané stericky tienené aminoskupiny, vyvinutý Ústavom makromolekulárnej chémie AV ČR.

NÁVOD NA POUŽITIE GÉLU:

- očistite ranu od mechanických nečistôt, napr. častíc prachu, zvyškov predchádzajúcich liečebných materiálov, ktoré by mohli následne dráždiť a poškodzovať ranu
- otvorte tubu vpichom pomocou otočeného viečka
- aplikujte malé množstvo gélu na celú spodinu rany. Gél prilne na spodinu rany a postupne absorbuje sekréty a ďalšie tekutiny z rany
- ranu primárne zakryte sterilným štvorcem, najradšej z textilu nesajúceho (napr. mastný tyl), a sekundárne fixujte obvazom alebo náplastou. Drobné poranenia po nanesení gélu kryte náplastou s poduškou. Fixačné materiály musia cez okraj rany presahovať približne o 1 cm.
- v prípade indikovaných pacientov s preukázanou infekciou je nutné dodržať ordináciu ATB a ďalších liekov podľa rozhodnutia lekára;
- pacienti s indikáciou kompresívnej terapie majú liečbu doplnenú o bandáž krátkotiažným obvazom
- účinok gélu sa prejavuje napačením. Unikátna technológia gélu zabraňuje prilpeniu k rane a tým umožňuje aj veľmi jednoduché odstránenie bez bolesti jemným zotretím.
- prevážajte podľa potreby najneskôr po 24 hodinách. V prípade infikovaných rán odporúčame častejšie výmeny

POZNÁMKY:

Doterajšia prax a klinické skúšky ukázali, že vlhké prostredie výrazne urýchľuje proces hojenia, podporuje delenie a pohyb buniek v rane. Zároveň udržuje stálu teplotu v rane, čo je veľmi dôležité pre kvalitné zahojenie. Pri liečbe komplikovaných a infikovaných rán je nevyhnutné dodržiavať ďalšie požiadavky na liečbu, napr. dostatočnú výživu, čistotu rany, liečbu vedľajších ochorení a dodržiavanie ďalších liečebných pokynov lekára.

KONTRAINDIKÁCIE:

Pri použití **UniGel[®] APOTEX** neboli popísané žiadne vedľajšie účinky typu alergií, zvýšenia bolestivosti a pod., ani žiadne ďalšie kontraindikácie. Ľahké kožné podráždenie u osôb so zvýšenou citlivosťou, napr. ľahké svrbenie, nie je na prekážku.

UPOZORNENIE:

V prípade výskytu vedľajších nežiaducich účinkov (zvýšená bolestivosť, začervenanie a pod.) prerušte liečbu a kontaktujte ošetrojúceho lekára. Chráňte pred deťmi! Nepoužívajte vnútorne! Nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby uvedenej na tube.

SKLADOVANIE:

Skladujte v suchu pri teplote 15-25 °C.

BALENIE:

Tuba 5 g, 30 g.

VÝROBCA:

WAKE spol. s r.o., Šrobárova 1869/14, 100 41 Praha 10, Česká republika, www.hemagel.cz.

DISTRIBÚTOR:

APOTEX (ČR) spol. s r.o., Na Poříčí 1079/3a, Praha 1, www.apotex.cz.